

ABCB1-Test: Anleitung zur Blutentnahme

Kurzanleitung



1) Anforderungsschein ausdrucken

Gehen Sie auf die Website Ihres durchführenden Labors, und drucken Sie den Anforderungsschein aus. Der ABCB1-Test ist eine molekulargenetische Untersuchung. Gemäss dem Bundesgesetz über genetische Untersuchungen beim Menschen (GUMG) ist eine informierte Zustimmung des Patienten zur Durchführung genetischer Analysen erforderlich. Das aktuelle Formular können Sie von der Website www.sgm.ch herunterladen und mit Ihrer Unterschrift und Ihrem Stempel versehen dem Auftrag beilegen.




2) Anforderungsschein ausfüllen und unterschreiben

Füllen Sie den Anforderungsschein und die Einwilligungserklärung gemeinsam mit Ihrem Patienten aus.



3) Blutentnahme

Sie nehmen dem Patienten mit einem EDTA-Röhrchen venöses Blut ab.

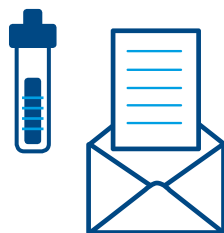

4) Versand an ein Labor

Versenden Sie das EDTA-Blutentnahmeröhrchen mit den ausgefüllten Formularen unter Verwendung eines frankierten handelsüblichen Briefumschlags an die auf dem Anforderungsschein angegebene Adresse des durchführenden Labors.



5) Erhalt des Befunds

Sie erhalten das Ergebnis der ABCB1-Genotypisierung mitsamt individueller Therapieempfehlung per Post oder Fax vom durchführenden Labor. Der ABCB1-Test ermöglicht die individuelle Vorhersage der geeigneten Medikation zu Behandlungsbeginn. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit eines schnellen Ansprechens auf Antidepressiva, unerwünschte Nebenwirkungen werden reduziert, und erfolglose Behandlungsversuche werden vermieden.